

## MODE D'EMPLOI

### Table d'appoint 376

Nous tenons tout d'abord à vous remercier pour la confiance que vous nous accordez en optant pour un produit VERMEIREN.

Avant d'utiliser la table d'appoint, lisez attentivement le mode d'emploi ; il vous permettra de vous familiariser avec la manipulation de ce produit. Il contient également des instructions sur l'entretien de votre table d'appoint. N'oubliez pas que le respect de nos instructions vous permettra de conserver votre table d'appoint en parfait état de conservation et de fonctionnement, même après des années d'utilisation.

Si vous avez d'autres questions, veuillez vous adresser à votre revendeur.

### Caractéristiques techniques

Hauteur :	61 - 96 cm
Longueur :	92 cm
Largeur :	46 cm
Profondeur d'insertion :	76 cm
Garde au sol :	8 cm
Petite tablette :	15 x 40 cm (L x l)
Grande tablette :	60 x 40 cm (L x l)
Charge petite tablette :	<b>max. 15 kg</b>
Charge grande tablette :	<b>max. 15 kg</b>

### Étendue de la livraison

- Console (4 roulettes comprises)
- Cadre supérieur (tablette, table réglable comprise)
- Mode d'emploi

### Utilisation

La table d'appoint sert à déposer des objets et peut être glissée latéralement sous un lit d'hôpital. Elle ne sert pas à soutenir le patient ou d'autres personnes. Elle ne sert pas à transporter des personnes ou des objets. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dégâts causés par une erreur de manipulation.

### Installation / montage

Posez la console sur les 4 roulettes. Introduisez les tubes d'insertion du cadre supérieur dans les logements prévus à cet effet dans la console et fixez-les à la hauteur souhaitée à l'aide d'aillettes (**profondeur d'insertion minimum : 8 cm**). Introduisez le cadre supérieur de manière à ce que les tablettes soient suspendues librement au-dessus de la console.

→ ATTENTION : Il faut serrer les ailettes avant de pouvoir déposer des objets sur la tablette correspondante.

→ ATTENTION : Veuillez à ne pas incliner les tubes d'insertion et à les introduire entièrement.

→ ATTENTION : Avant utilisation, vérifiez que les ailettes du système de réglage de la tablette soient bien serrées.

### Réglages

La tablette est extensible à l'horizontale (réglage en longueur). Desserrez les ailettes sous la table. Vous pouvez maintenant régler à la fois la longueur et l'inclinaison de la table. Rebloquez ensuite la tablette à l'aide des ailettes.

→ La stabilité du produit au basculement varie en fonction des réglages de la table.

→ Inclinez la table dans une position qui ne provoque pas la chute des objets.



### Sécurité

→ Ne vous placez pas debout sur les tubes de la console ; la table d'appoint pourrait basculer - Risque de blessure !

→ Ne vous appuyez pas contre ou sur les tablettes - Risque de basculement !

→ Ne levez pas la table d'appoint par les tablettes. Ces parties sont réglables et peuvent provoquer des blessures ou des dégâts si on les soulève car elles ne sont pas suffisamment bloquées.

→ Ne posez pas d'objets plus grands que les tablettes. Ils pourraient tomber et provoquer des blessures/dégâts.

→ Ne posez pas d'objets qui dépassent la capacité de charge de la table (15 kg) - Risque de basculement !

→ Ne transportez pas de personnes ou d'objets - Risque de blessure !

→ Posez la table d'appoint exclusivement sur des surfaces planes à l'intérieur. Veillez à ce que les 4 roulettes reposent uniformément sur le sol quand vous utilisez la table.

→ Les réparations ne peuvent être effectuées que par le revendeur.

→ Respectez les instructions pour l'entretien. Le fabricant n'est pas responsable des dégâts dus à un entretien déficient.

### Entretien

Pour le nettoyage, il est préférable d'utiliser une solution savonneuse. Dans tous les cas, le produit de nettoyage doit avoir un pH de 6 min. N'utilisez pas de produits de nettoyage contenant du dissolvant. Suivez les instructions fournies avec le produit d'entretien. Pour le nettoyage, utilisez un chiffon humide et de l'eau tiède. Évitez de nettoyer à grandes eaux. N'utilisez pas de brosses métalliques ou autres ustensiles de nettoyage à arêtes vives ou pointus. S'il y a des dégâts à la peinture ou au bois, adressez-vous à votre revendeur. Un entretien régulier permet de garder votre table d'appoint en parfait état.

### Désinfection

Pour la désinfection, utilisez exclusivement des produits désinfectants qui conviennent pour les surfaces métalliques peintes ou pour les surfaces en bois. Suivez les instructions fournies avec le produit désinfectant. Utilisez exclusivement les procédés (désinfection par brossage) et produits désinfectants homologués suivant les indications du Robert Koch-Institut (informations sur : [www.rki.de](http://www.rki.de)). Une désinfection ne peut être exécutée que par le personnel formé à cet effet. Adressez-vous à votre revendeur.

### Réparation / entretien / inspection

Utilisez uniquement des pièces d'origine VERMEIREN. Les réparations et les dépannages ne peuvent être effectués que par un personnel formé à cet effet. Utilisez le service après-vente de votre revendeur. Il vous aidera volontiers lors de l'entretien et de la réparation.

Avant chaque réutilisation, il faut entretenir la table d'appoint en vérifiant les critères suivants :

- Complétude de produit
- Fonctionnement des réglages
- Contrôle des roulettes (arrêt, alignement, fixation par vis)
- Réglage des écrous à oreilles (état, filet, sécurité de retenue)
- Cadre (déformation, stabilité statique)
- Tablettes (surfaces fermées, éclats, fissures)
- Dégâts de la peinture (éliminer les points de rouille et retoucher la peinture)

### Stockage

+ 5° à + 45° Celsius  
20% - 75% HR



**Vente/S.A.V. :** Vermeiren France  
Zone Industrielle – 5 Rue d'Ennevelin  
F-59710 Avelin  
Téléphone : (33) 3 28550798  
Télécopie : (33) 3 20902889